



Tutoriel : Intégration d'un enregistrement dans le logiciel Noxturnal


1/ Récupération du produit

Vous avez fait l'acquisition d'un ou de plusieurs enregistrements sur notre librairie d'enregistrement, félicitation.

Une fois votre achat effectué, vous recevrez un mail avec un lien de téléchargement pour pouvoir récupérer votre produit.

Vous retrouvez aussi ce produit depuis votre espace client dans l'espace « Téléchargements ».

Lancer le téléchargement pour pouvoir l'avoir sur son ordinateur. Le produit sera situé par défaut dans votre dossier natif « Téléchargements ».

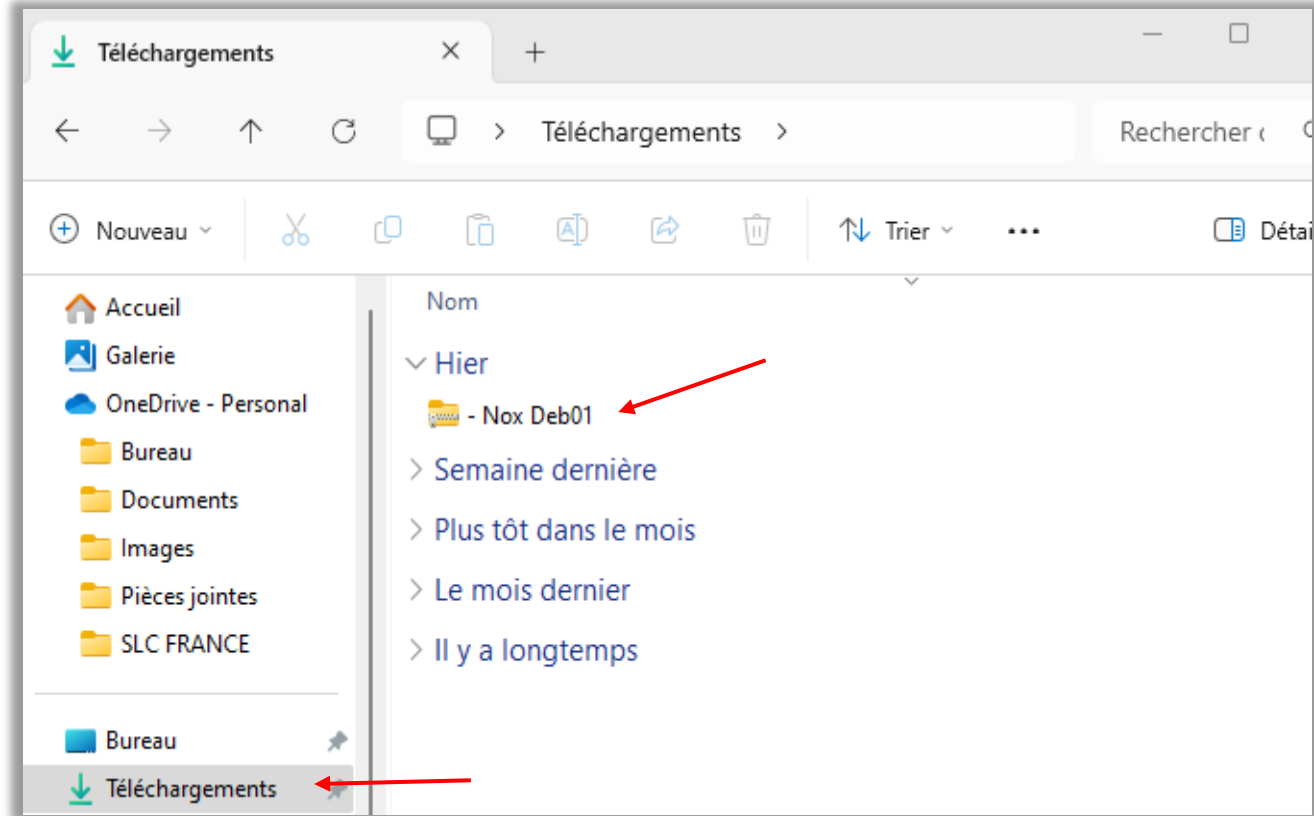


2/ Création du dossier pour déposer les produits


Avant toute chose, nous vous recommandons de créer un dossier sur votre ordinateur où vous allez pouvoir ranger les enregistrements achetés sur le site SLC Training.

Vous êtes libre de le placer où le souhaitez.

Nous avons créé un dossier SLC Training sur notre bureau (1) pour y placer le fichier .zip du produit.

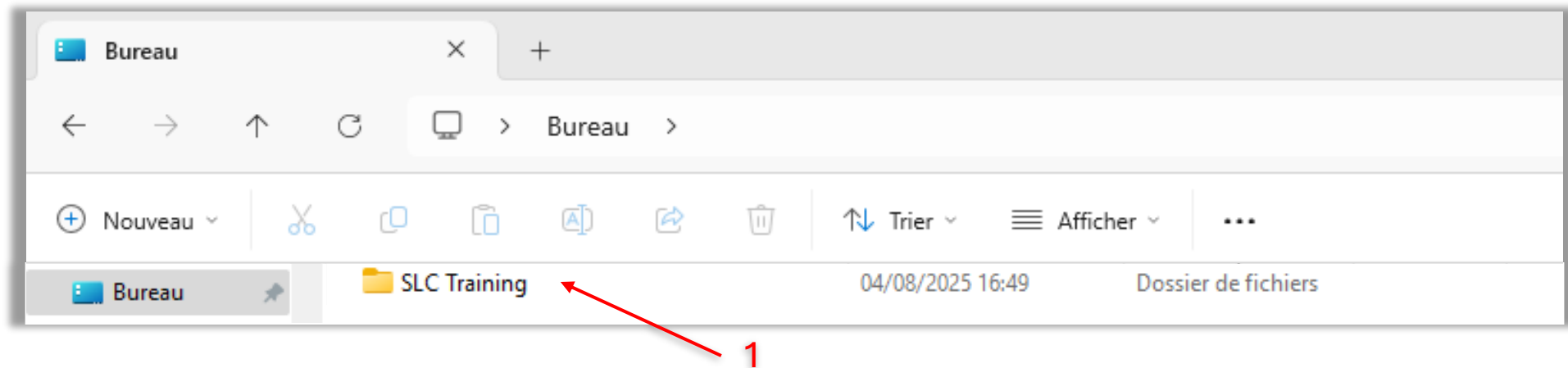

3/ Décompression du produit

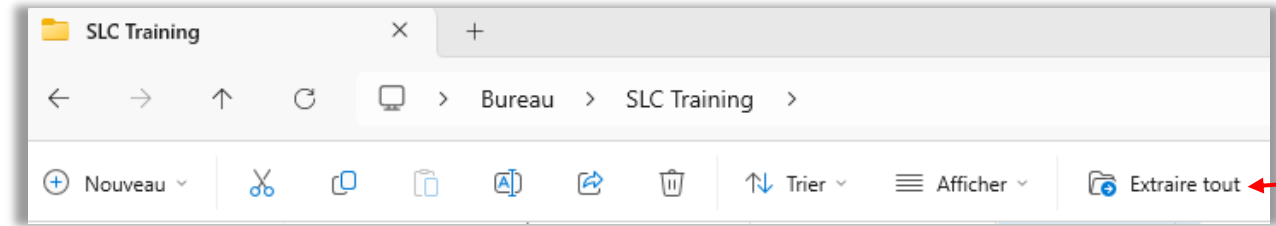


Le produit récupéré se présente sous la forme d'un fichier .zip (fichier compressé) dans lequel se trouve :

- *Un ensemble de fichiers .ndb correspondant aux fichiers de l'enregistrement*
- *Un dossier comportant le fichier de commentaire (PDF ou vidéo) de l'enregistrement*

Décompresser le fichier .zip afin de pouvoir utiliser votre produit.

Pour cela sélectionner l'option « extraire tout » depuis :

- le menu de l'explorateur de fichier après avoir sélectionné le fichier (3)
- ou le menu contextuel accessible par un clic droit (4).

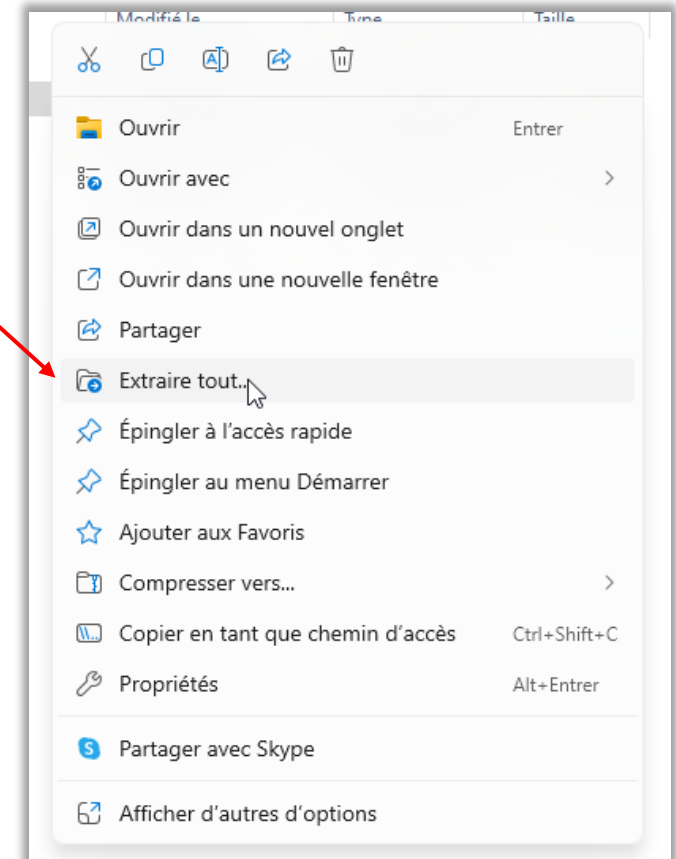

4/ Créer l'emplacement dans votre logiciel



Il reste donc à paramétrer la bibliothèque du logiciel pour pouvoir accéder à l'enregistrement.

Pour ajouter un emplacement dans la bibliothèque vous avez deux possibilités :

- Faire un clic droit sur « Mes emplacements » (1)
- Cliquer sur le bouton en bas de la page « Ajouter » (2).

Dans les deux cas un menu contextuel s'affichera qui proposera l'option (3) « Ajouter un emplacement ».


Sélectionner cette option et aller retrouver le dossier créé précédemment (SLC Training dans notre exemple).

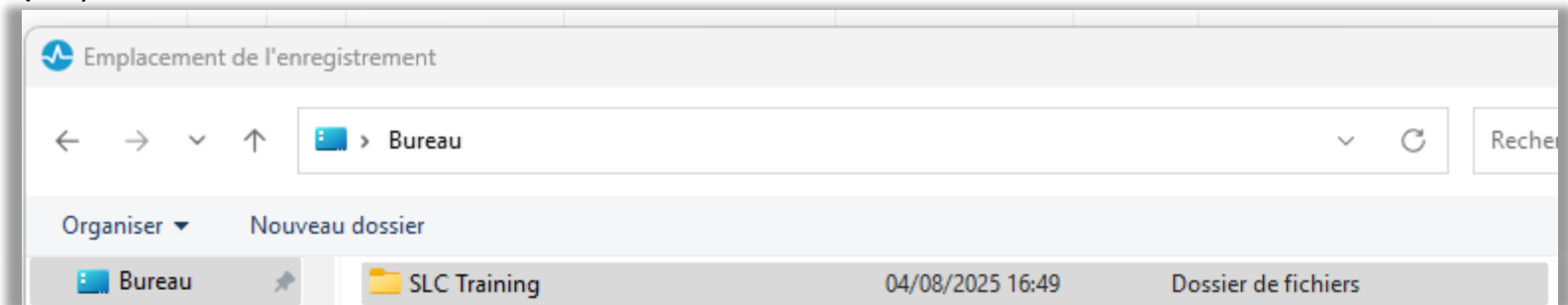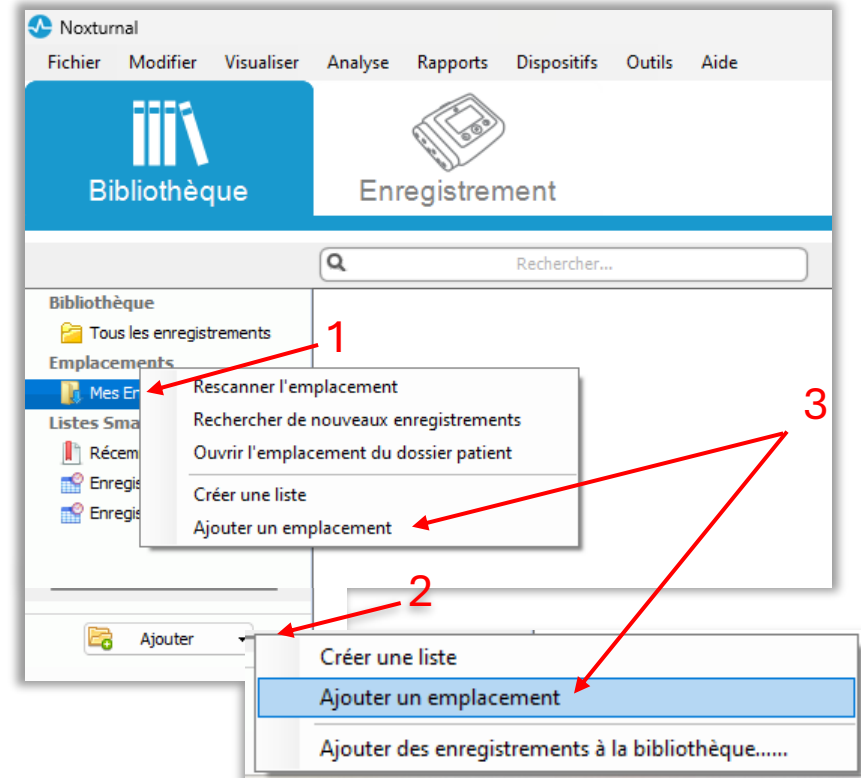



5/ Ouverture de l'enregistrement sur le logiciel

L'enregistrement est maintenant visible dans votre bibliothèque.

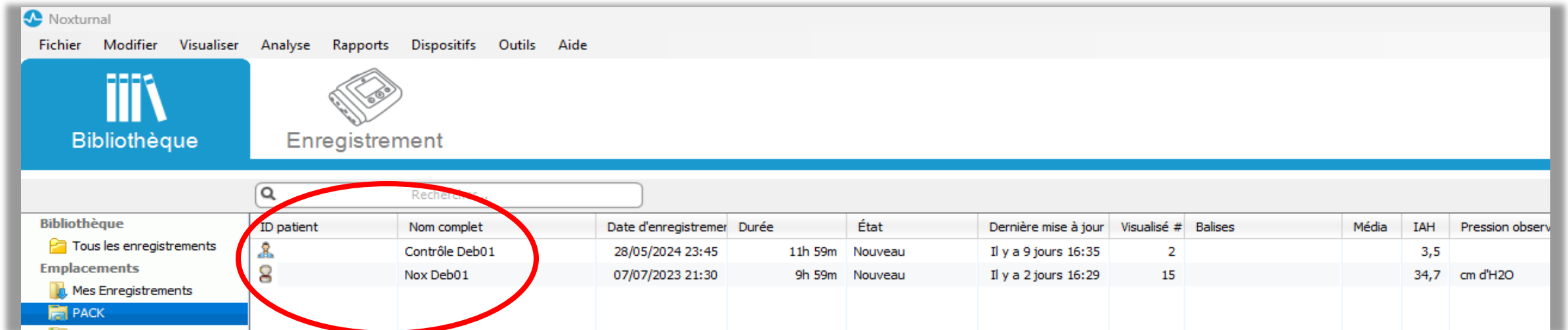Il suffit donc de cliquer dessus pour pouvoir l'ouvrir et commencer le travail de lecture.




The screenshot shows the Noxturnal software interface. The top menu includes 'Fichier', 'Modifier', 'Visualiser', 'Analyse', 'Rapports', 'Dispositifs', 'Outils', and 'Aide'. Below the menu, there are two main sections: 'Bibliothèque' (Library) and 'Enregistrement' (Recording). The 'Bibliothèque' section is highlighted in blue. A search bar is located above the table. The table displays a list of recordings with the following columns: ID patient, Nom complet, Date d'enregistrement, Durée, État, Dernière mise à jour, Visualisé #, Balises, Média, IAH, and Pression observée. A red circle highlights the first two columns of the first two rows of the table.

ID patient	Nom complet	Date d'enregistrement	Durée	État	Dernière mise à jour	Visualisé #	Balises	Média	IAH	Pression observée
	Contrôle Deb01	28/05/2024 23:45	11h 59m	Nouveau	Il y a 9 jours 16:35	2			3,5	
	Nox Deb01	07/07/2023 21:30	9h 59m	Nouveau	Il y a 2 jours 16:29	15			34,7	cm d'H2O

6/ Démarrer l'exercice


A l'ouverture de l'enregistrement vous êtes sur le codage qui s'appelle EXERCICE (1).
 Sur ce codage se trouve l'analyse automatique du logiciel.
 C'est sur ce codage que nous vous invitons à réaliser votre travail de lecture.

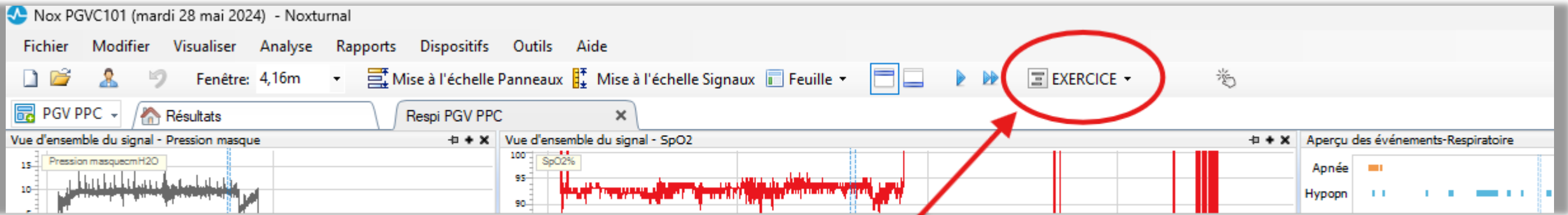

En cliquant sur EXERCICE, le menu des codages s'ouvre.
 Le codage SLC est alors accessible (2).
 Sur ce codage vous avez accès à l'analyse réalisée manuellement
 par nos soins qui vous permettra de comparer avec ce que vous
 avez fait.

Vous pouvez ainsi naviguer d'un codage à l'autre à loisir.

Bonne lecture !

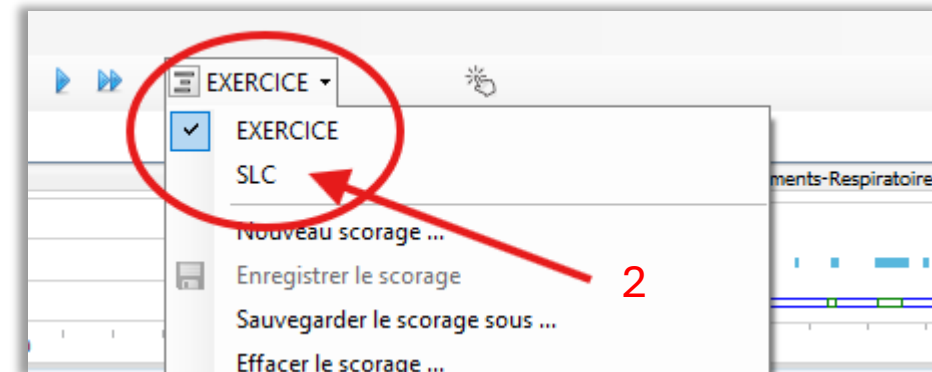


Notre recommandation de codage

Pour la polygraphie

- Réaliser l'analyse de la partie respiratoire manuellement à partir du codage automatique.
- Vous pouvez relancer l'analyse sur le signal du flux cRIP si le flux nasal n'a pas une qualité suffisante.

Pour la polysomnographie :

- Nous vous conseillons de réaliser le codage de la partie neurologique sans analyse automatique. Pour cela faire un clic droit sur une époque de sommeil déjà codée et choisir « Effacer stades de sommeil ».
- Une fois la lecture de la partie neurologique réalisée, lancer l'analyse automatique de la partie respiratoire.
- Réaliser maintenant l'analyse de la partie respiratoire.

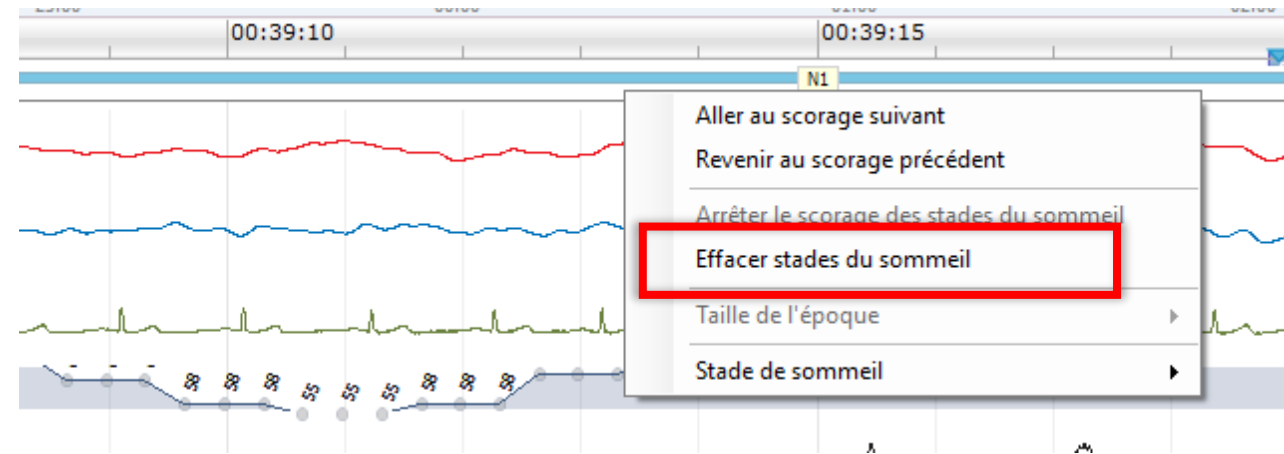

Bonne lecture !