



## **Tutoriel :** Intégration d'un enregistrement dans le logiciel Cidelec


## 1/ Récupération du produit

Vous avez fait l'acquisition d'un ou de plusieurs enregistrements sur notre librairie d'enregistrement, félicitation.

Une fois votre achat effectué, vous recevrez un mail avec un lien de téléchargement pour pouvoir récupérer votre produit.

Vous retrouvez aussi ce produit depuis votre espace client dans l'espace « Téléchargements ».

Lancer le téléchargement pour le récupérer sur votre ordinateur. Le produit sera situé par défaut dans votre dossier natif « Téléchargements ».

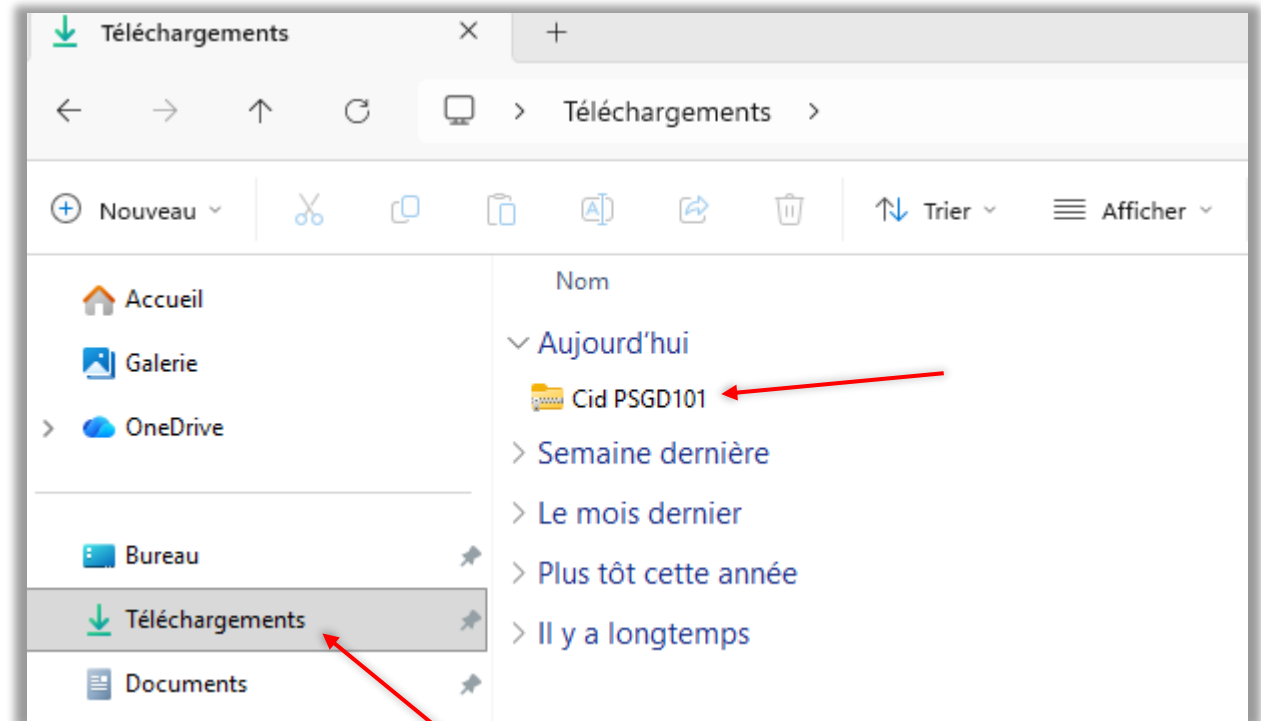


## 2/ Création du dossier pour déposer les produits


Avant toute chose, nous vous recommandons de créer un dossier sur votre ordinateur où vous allez pouvoir ranger les enregistrements achetés sur le site SLC Training.

Vous êtes libre de le placer où le souhaitez.

Nous avons créé, pour l'exemple, un dossier SLC Training sur notre bureau (1) pour y placer le fichier .zip du produit.

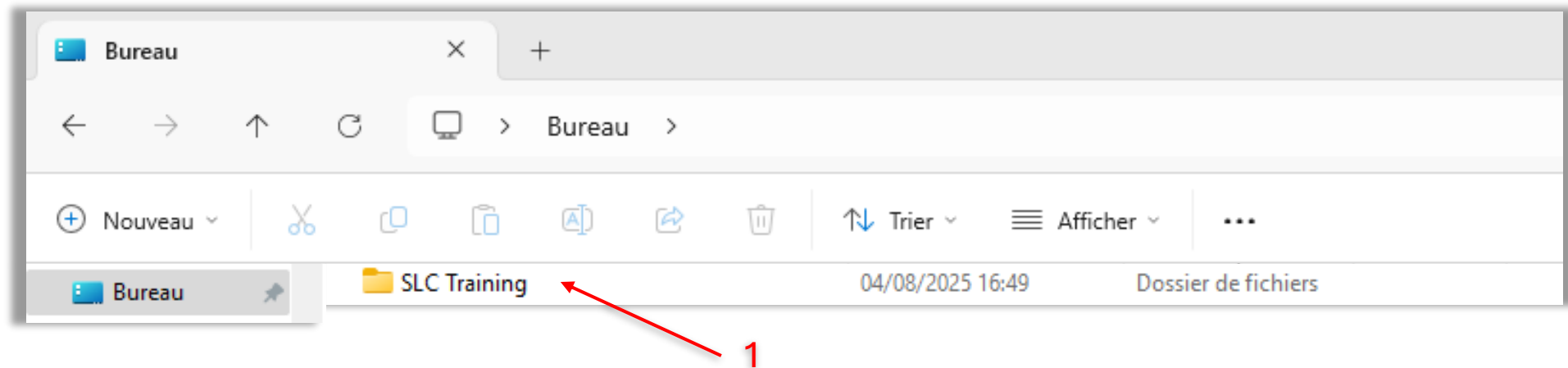

### 3/ Décompression du produit

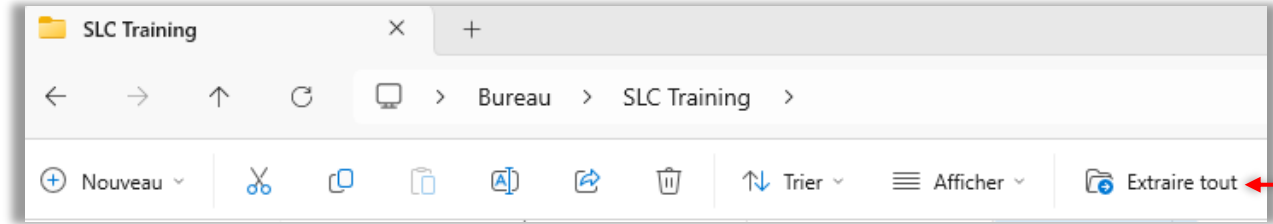


*Le produit récupéré se présente sous la forme d'un fichier .zip (fichier compressé) dans lequel se trouve :*

- *Deux fichiers .cid correspondants aux versions de l'enregistrement, une nommée « Exercice », sans codage pour pouvoir réaliser votre codage et une nommée « Corrigé » comportant le codage réalisé par notre équipe.*
- *Un fichier de commentaire de l'enregistrement*

Décompresser le fichier .zip afin de pouvoir utiliser votre produit.

Pour cela sélectionner l'option « extraire tout » depuis :

- le menu de l'explorateur de fichier après avoir sélectionné le fichier (3)
- ou le menu contextuel accessible par un clic droit (4).



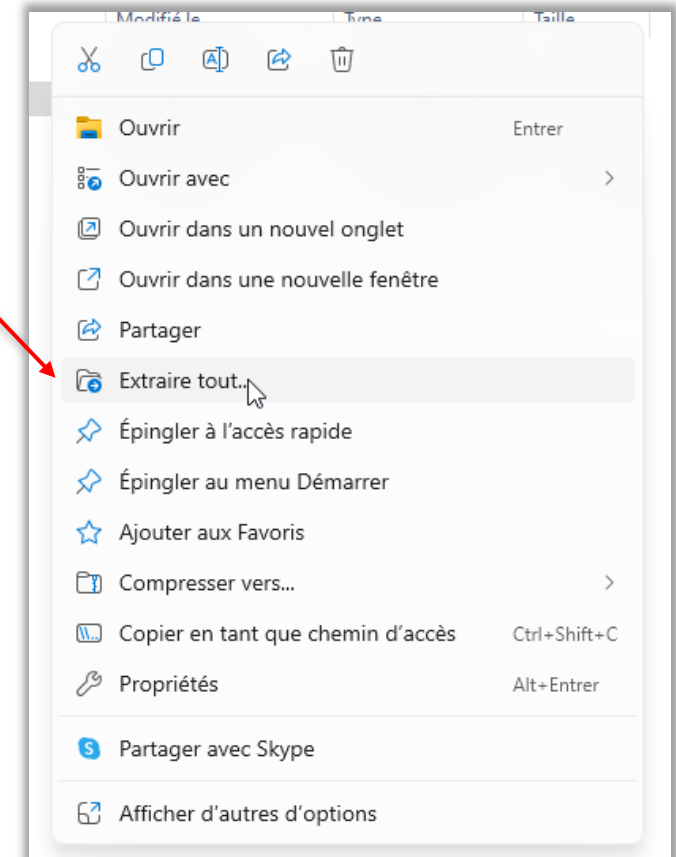


## 4/ Créer l'emplacement dans votre logiciel

Il reste donc à paramétrer la bibliothèque du logiciel pour pouvoir accéder à l'enregistrement.

Pour ajouter un emplacement dans la bibliothèque de votre logiciel suivez les étapes suivantes :

- Allez dans « Ouvrir un dossier » (1).
- Cliquer sur le bouton en bas de la page « Ajouter » (2).
- Retrouver dans l'arborescence le dossier SLC Training créé précédemment (3).
- Sélectionnez « Nouveau favori » (4), ce qui créera une nouvelle entrée dans la bibliothèque (5) qui restera en mémoire.

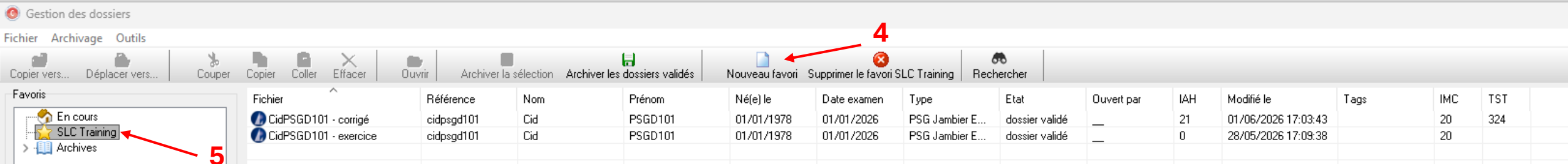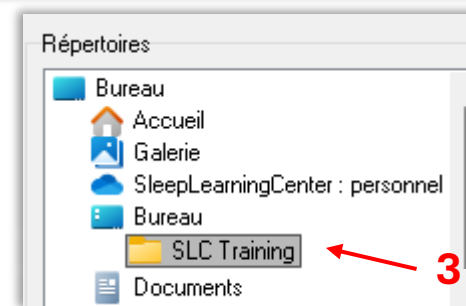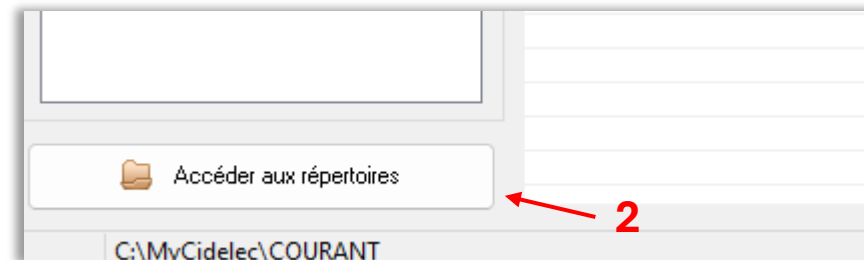

## 5/ Ouverture de l'enregistrement sur le logiciel

Les deux enregistrements (Exercice et Corrigé) sont maintenant visibles dans votre bibliothèque.

Cliquer sur le fichier Exercice pour l'ouvrir et commencer le travail de lecture.

Le fichier Corrigé vous servira pour confronter votre travail.

Gestion des dossiers

Fichier Archivage Outils

Copier vers... Déplacer vers... Couper Copier Coller Effacer Ouvrir Archiver la sélection Archiver les dossiers validés Nouveau favori Supprimer le favori SLC Training Rechercher

Favoris

- En cours
- SLC Training
- Archives

Fichier	Référence	Nom	Prénom	Né(e) le	Date examen	Type	Etat	Ouvert par	IAH	Modifié le	Tags	IMC	TST
CidPSGD101 - corrigé	cidpsgd101	Cid	PSGD101	01/01/1978	01/01/2026	PSG Jambier E...	dossier validé	—	21	01/06/2026 17:03:43		20	324
CidPSGD101 - exercice	cidpsgd101	Cid	PSGD101	01/01/1978	01/01/2026	PSG Jambier E...	dossier validé	—	0	28/05/2026 17:09:38		20	

## 6/ Démarrer l'exercice

Le fichier Exercice est vierge de tout codage.

Vous pouvez maintenant travailler selon vos habitudes sur votre profil d'affichage.



Si vous souhaitez lancer une analyse automatique vous pouvez le faire depuis le menu Traitement à l'intérieur de l'enregistrement.

Pour lancer une analyse de la partie neurologique procéder ainsi :

- Cliquer sur Hypnogramme et micro-éveil (1)
- Valider les options « Hypnogramme 1/2 automatique » et « Détection des micro-éveils ».
- Sélectionner une voie EEG pour la réalisation de l'hypnogramme.

Pour lancer une analyse de la partie respiratoire :

- Cliquer sur « Autres » (2)
- Valider

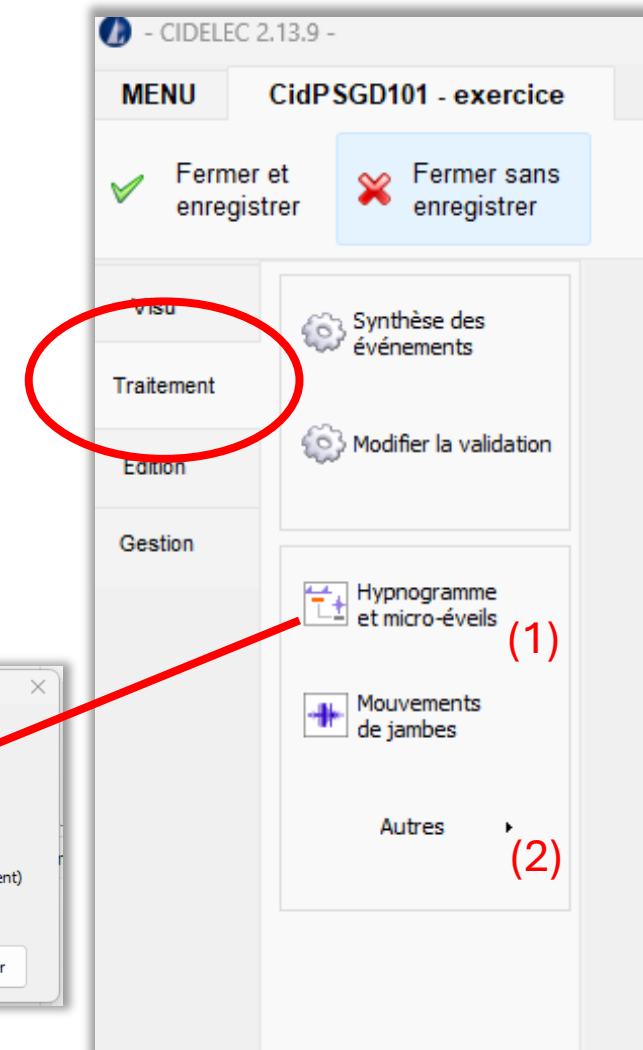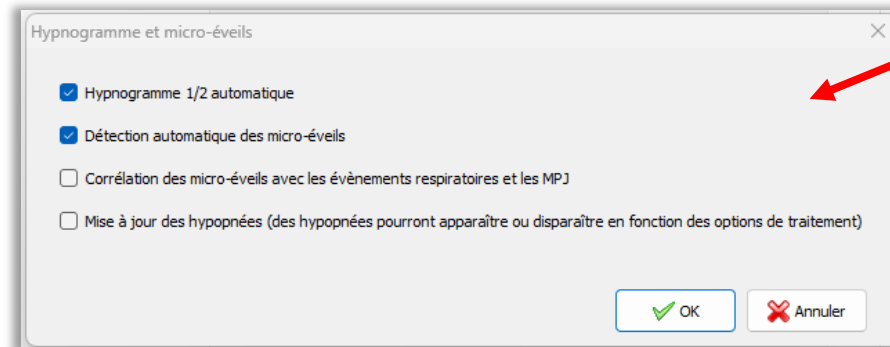

## **Notre recommandation de codage**

### **Pour la polygraphie**

- Lancer l'analyse automatique
- Réaliser l'analyse de la partie respiratoire manuellement à partir du codage proposé.

### **Pour la polysomnographie :**

- Nous vous conseillons de réaliser le codage de la partie neurologique sans analyse automatique.
- Une fois la lecture de la partie neurologique réalisée, lancer l'analyse automatique de la partie respiratoire.
- Réaliser maintenant l'analyse de la partie respiratoire.

Bonne lecture !