



Tutoriel : Intégration d'un enregistrement dans le logiciel Noxturnal


1/ Récupération du produit

Vous avez fait l'acquisition d'un ou de plusieurs enregistrements sur notre librairie d'enregistrement, félicitation.

Une fois votre achat effectué, vous recevrez un mail avec un lien de téléchargement pour pouvoir récupérer votre produit.

Vous retrouvez aussi ce produit depuis votre espace client dans l'espace « Téléchargements ».


Lancer le téléchargement pour pouvoir l'avoir sur son ordinateur. Le produit sera situé par défaut dans votre dossier natif « Téléchargements ».

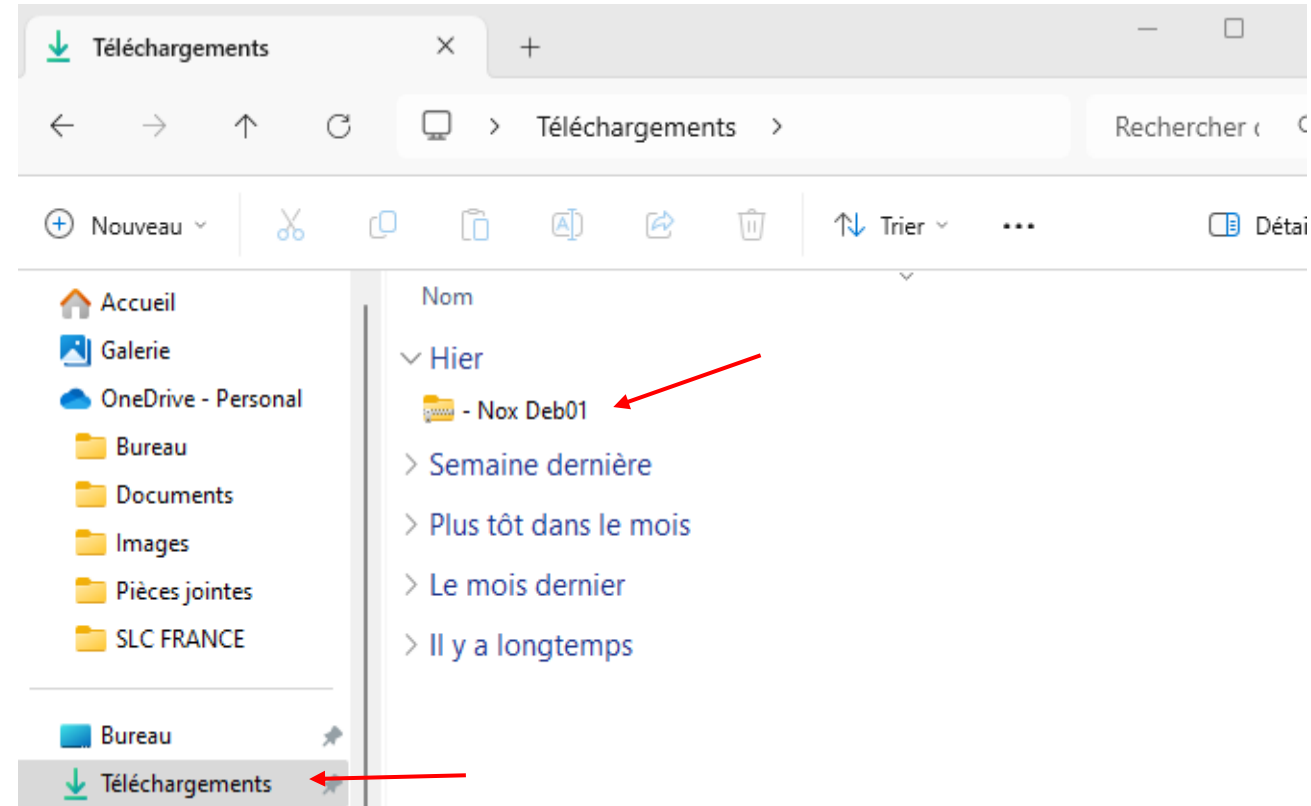


3/ Création du dossier pour déposer les produits

Avant toute chose, nous vous recommandons de créer un dossier sur votre ordinateur où vous allez pouvoir ranger les produits achetés sur librairie du SLC. Vous êtes libre de l'organiser comme vous le souhaitez (sur le Bureau par exemple).

Nous avons créé un dossier SLC Training sur notre bureau (1) pour y placer le fichier .zip du produit.

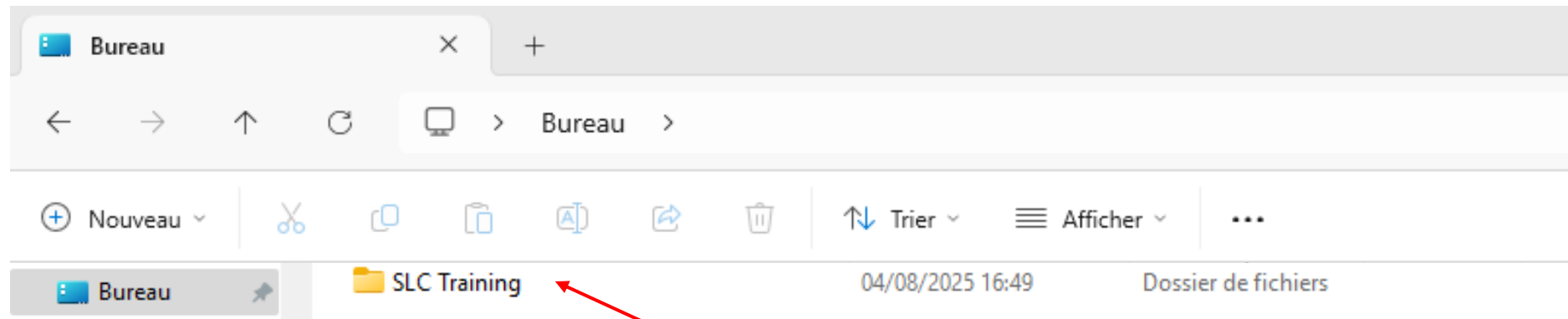

4/ Décompression du produit

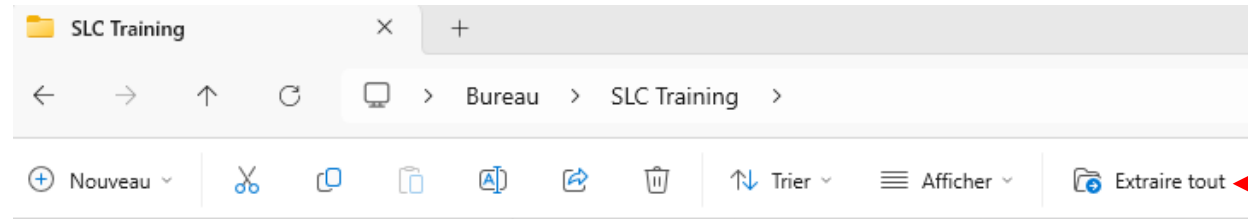

Le produit récupéré se présente sous la forme d'un fichier .zip (fichier compressé) dans lequel se trouve :

- Les fichiers de l'enregistrement
- Un dossier comportant les fichiers de commentaires de l'enregistrement


Décompresser le fichier .zip afin de pouvoir utiliser votre produit.

Pour cela sélectionner l'option « extraire tout » depuis :

- le menu de l'explorateur de fichier après avoir sélectionné le fichier (3)
- ou le menu contextuel accessible par un clic droit (4).

Vous obtenez donc un dossier ayant cette architecture :

- Un ensemble de fichiers .ndb correspondant aux fichiers de l'enregistrement.
- Un dossier contenant les commentaires sous forme de PDF ou de vidéo (selon le produit).

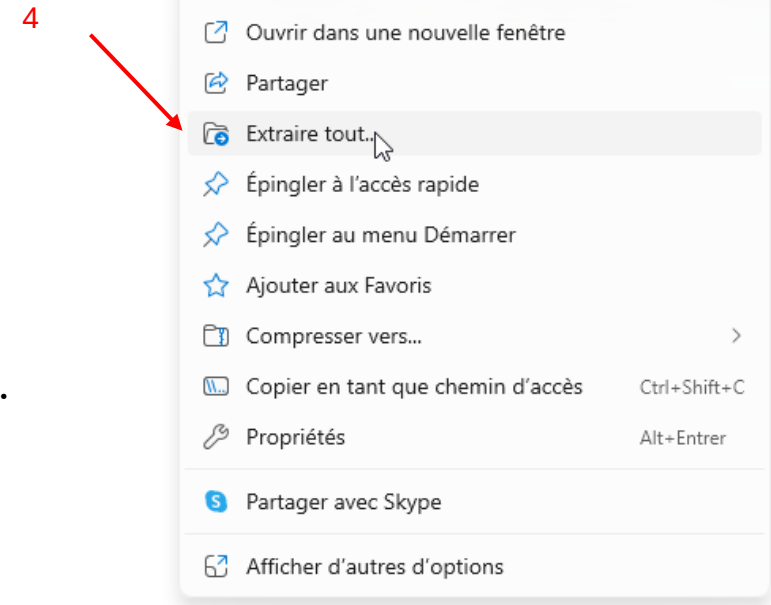

5/ Créer l'emplacement dans votre logiciel



Il reste donc à paramétrer la bibliothèque du logiciel pour pouvoir accéder à l'enregistrement.


Pour ajouter un emplacement dans la bibliothèque vous avez deux possibilités :

- Faire un clic droit sur « Mes emplacements » (1)
- Cliquer sur le bouton en bas de la page « Ajouter » (2).

Dans les deux cas un menu contextuel s'affichera qui proposera l'option (3) « Ajouter un emplacement ».

Sélectionner cette option et aller retrouver le dossier créé précédemment (SLC Training dans notre exemple).

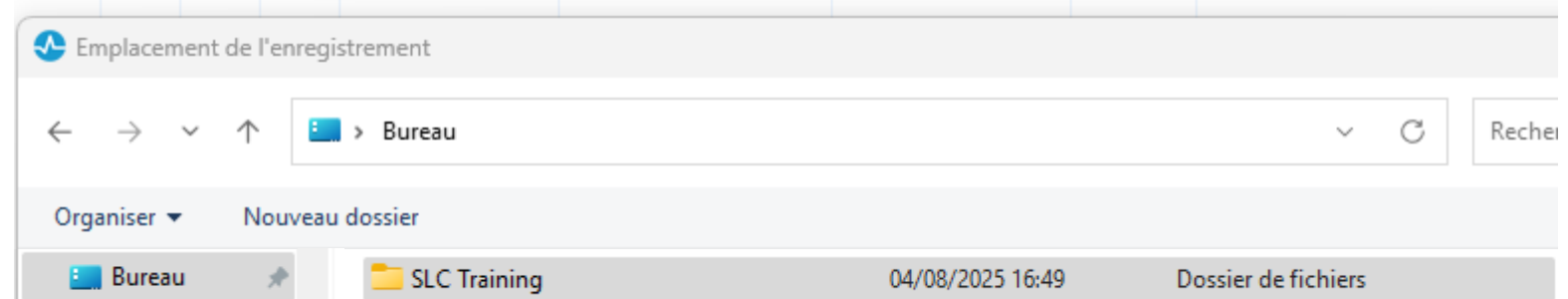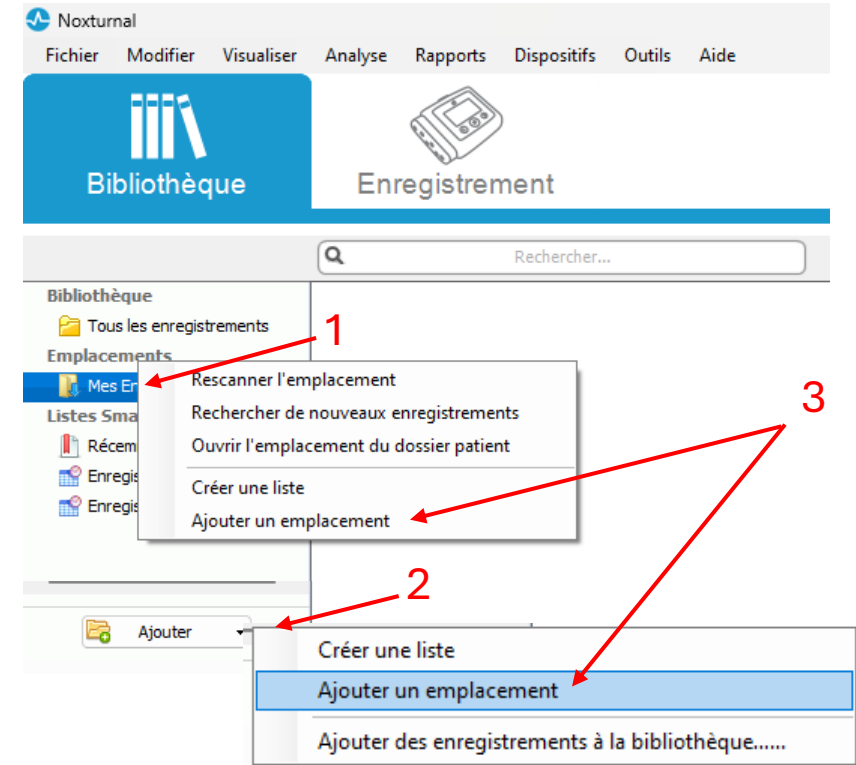

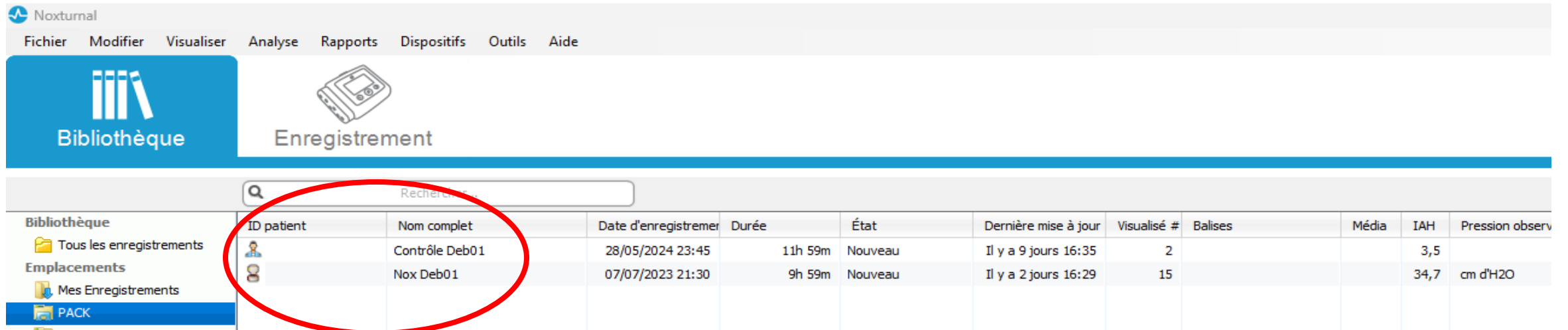

7/ Démarrer l'exercice

A l'ouverture de l'enregistrement vous êtes sur le codage qui s'appelle EXERCICE (1).
Sur ce codage se trouve l'analyse automatique du logiciel.
C'est sur ce codage que nous vous invitons à réaliser votre travail de lecture.



En cliquant sur EXERCICE, le menu des codages s'ouvre.
Le codage SLC est alors accessible (2).
Sur ce codage vous avez accès à l'analyse réalisée manuellement
par nos soins qui vous permettra de comparer avec ce que vous
avez fait.

Vous pouvez ainsi naviguer d'un codage à l'autre à loisir.

Bonne lecture !

